

Patienteninformation

ewimed



Was uns auszeichnet



Für uns steht der Patient im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es daher, Sie als Patient rundum bestens zu betreuen und Ihnen Sicherheit im Umgang mit den Drainage-Systemen zu geben. Das ewimed Versorgungskonzept garantiert eine schnelle, persönliche und lückenlose Einweisung. Unsere kompetenten Schulungsmitarbeiter kommen bereits seit Jahren zu jedem Patienten nach Hause und geben ihm selbst, seinen Angehörigen oder den Pflegenden in gewohnter Umgebung eine Einweisung in die korrekte Handhabung unserer Drainage-Systeme.

Der Patient muss zur Drainage nicht mehr in die Klinik und kann mehr Zeit mit seiner Familie und Freunden verbringen. Dies steigert die Lebensqualität der Patienten und entlastet gleichzeitig die Kliniken. Das ist uns wichtig und hierauf sind wir stolz.

Inhalt

4

Patienteninformation



6

Drainage-Anleitung | drainova® Reservoir, Drainage-Set

Art. Nr. 2010

Bei Ableitung durch Soft-Vakuum



8

Drainage-Anleitung | ewimed Drainage-Set, 2000 ml

Art. Nr. 50-7505, 50-7505/4

Bei Ableitung durch Schwerkraft



10

Drainage-Anleitung | PleurX™ Drainage-Set

Art. Nr. 50-7500B, 50-7500B/4, 50-7510, 50-7510/4

Bei Ableitung durch Vakuum



12


Drainage-Anleitung | Verband anbringen

Art. Nr. 8020, 50-7290



14

Drainage-Aufzeichnungen

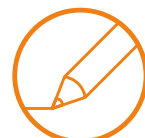



Patienteninformation



Wie bestellen Sie Drainage-Sets?

Je nachdem wie oft Sie eine Drainage durchführen, sollten Sie rechtzeitig Drainage-Sets nachbestellen.

Bitte senden Sie hierzu schnellstmöglich Ihr Originalrezept an ewimed an unten angegebene Adresse.

Wir benötigen **ca. 2-4 Arbeitstage**, um die Systeme an Ihre Adresse zu schicken. Die Pakete werden per Paketdienst direkt zu Ihnen nach Hause geliefert.

Welche Unterlagen benötigen Sie, um Drainage-Sets nachzubestellen?

Um mit Ihrer Krankenkasse abrechnen zu können, benötigen wir für die Drainage-Sets **zeitnah** ein **Rezept im Original**.

In der Regel erhalten Sie dieses von Ihrem Hausarzt. Auf dem auf Seite 5 abgebildeten Musterrezept finden Sie die Angaben, die auf dem Rezept stehen sollten.

Auch für das Paket, welches Sie bei der Patientenschulung erhalten haben, muss innerhalb einer Woche ein Rezept eingereicht werden!

Bei Fragen oder zur Bestellung von Produkten kontaktieren Sie uns unter:



ewimed GmbH
Dorfstraße 24
D – 72379 Hechingen-Boll

Tel.: +49 7471 73972-0
Fax: +49 7471 73972-13
E-Mail: info@ewimed.com
www.ewimed.com





Bestellinformationen, die auf dem Rezept stehen sollten:

Hilfsmittel ankreuzen

Hilfsmittel-Nr. eintragen:
01.24.05.0002

Krankenkasse, bzw. Kostenträger

Angaben zum Versicherten

Ableitung durch Soft-Vakuum

- Art. Nr. 2010
drainova® Reservoir Drainage-Set
2000 ml, 2 VE à 10 Stück

Ableitung durch Schwerkraft

- Art. Nr. 50-7505
ewimed Drainage-Set
2000 ml, 2 VE à 10 Stück

Ableitung durch Vakuum

- Art. Nr. 50-7510
PleurX™ Drainage-Set
1000 ml, 2 VE à 10 Stück

oder

- Art. Nr. 50-7500B
PleurX™ Drainage-Set
500 ml, 2 VE à 10 Stück

Wichtig: Aktuelle Diagnose

Stempel und Unterschrift des Arztes

The image shows a sample medical prescription form (Muster) with various fields. Red arrows point from the text boxes on the left to the corresponding fields on the form. The form includes fields for patient information (Name, Vorname, geb. am), insurance information (Krankenkasse bzw. Kostenträger, Kostenträgerkennung, Versicherungs-Nr., Status), and medical details (Rp., (Bitte Leerläufe durchschreiben)). There are also checkboxes for 'auf dem' and 'auf dem' (likely 'auf dem' and 'auf dem'). A large 'MUSTER' watermark is visible across the form.

Wichtig!

Die über Ihren Hausarzt verschriebenen Drainage-Sets dürfen nur zu Hause benutzt werden.

Bitte nehmen Sie die Produkte nicht mit ins Krankenhaus, da diese dann nicht von Ihrer Krankenkasse bezahlt werden. Bitten Sie Krankenhäuser, die unser System noch nicht kennen, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

Falls Sie Fragen zu der Handhabung der Produkte haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Für alle anderen Fragen ist es immer ratsam, Ihren behandelnden Arzt zu konsultieren!




Drainage-Anleitung | drainova® Reservoir, Drainage-Set

Art. Nr. 2010 | Bei Ableitung durch Soft-Vakuum



Hinweis: Die jeweils relevanten Bereiche des Produktes sind farblich hervorgehoben.
Bitte zusätzlich die detaillierte Gebrauchsanweisung sowie die darin enthaltenen Warnhinweise beachten.

- 1 |** Material aus dem Verbandmaterial-Set auf dem blauen Abdecktuch bereitlegen.

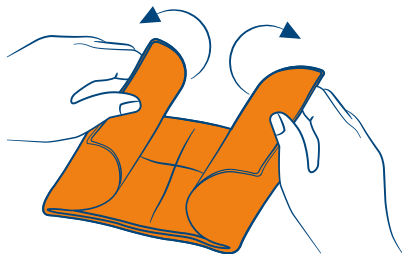


- 2 |** Handschuhe an der Öffnung anfassen und wie abgebildet anziehen.



- 3 |** Silikonkappe bzw. Schutzkappe vorsichtig abziehen und entsorgen.




Lösen der drainova® Silikonkappe

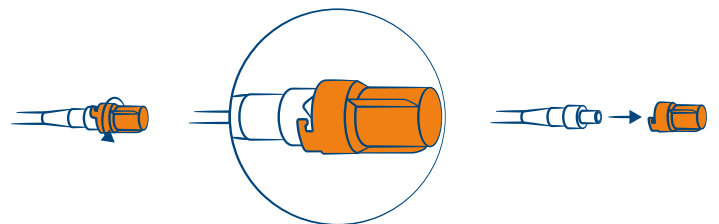


Lösen der PleurX™/drainova® Schutzkappe

- 4 |** Sicherheitsventil in die Verpackung eines Alkoholtupfers stecken und reinigen (30 Sekunden Einwirkzeit).

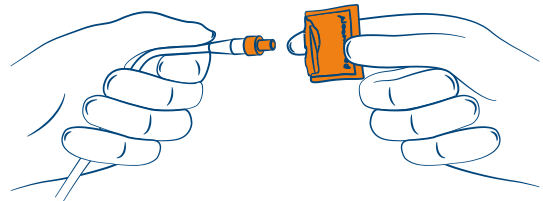




5 | Reservoir aus der Verpackung entnehmen und Fixierung, welche um das gewickelte Schlauchsystem angebracht ist, entfernen.

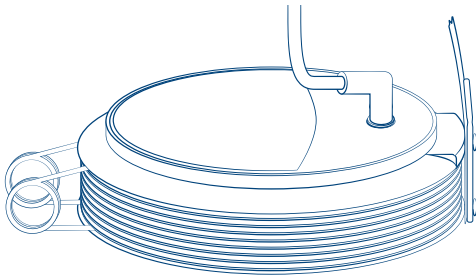

6 | Quetschklemme am Anschlussschlauch schließen.

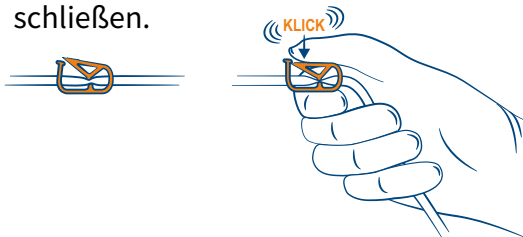


7 | Schutzhülle am Einführstift abziehen, ggfs. unter leichter Drehbewegung.




8 | Einführstift in das Sicherheitsventil schieben. Das Einrasten ist hör- und spürbar.




9 | 1. Reservoir zusammendrücken.
2. Orangefarbene Sicherung entfernen.

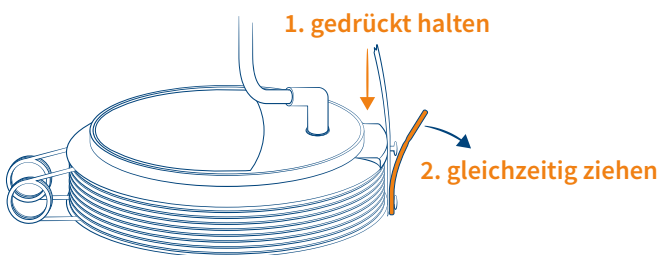


10 | Quetschklemme öffnen. Die Drainage beginnt.

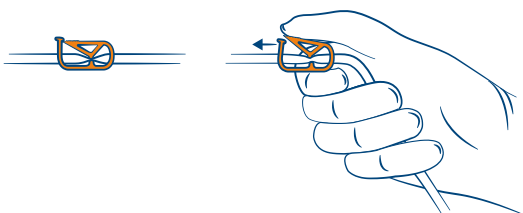

11 | Nach erfolgter Drainage Quetschklemme am Anschlussschlauch schließen.

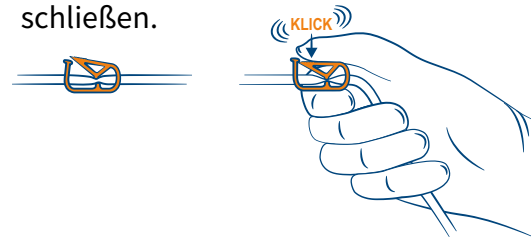


Hinweis: Bitte die Drainagemenge am oberen Halteknopf ablesen.

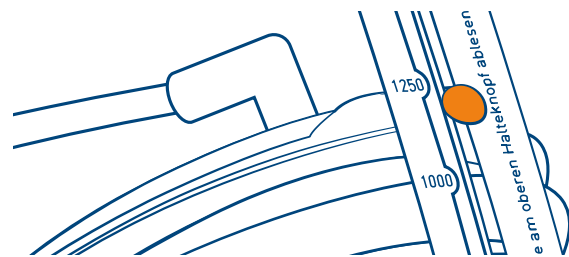


12 | Sicherheitsventil und Anschlussschlauch trennen.



13 | Sicherheitsventil in die Verpackung eines Alkoholtupfers stecken und reinigen (30 Sekunden Einwirkzeit).

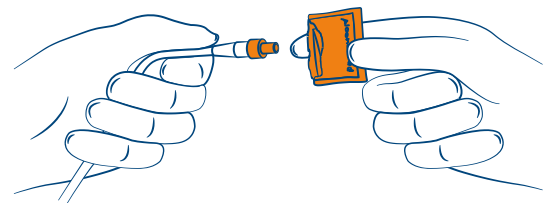

14 | Anbringen einer neuen Silikonkappe oder der Schutzkappe.

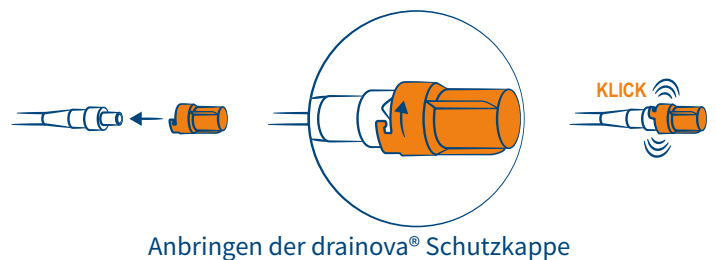

Code mit dem Smartphone scannen und Schulungsvideo ansehen.






Drainage-Anleitung | ewimed Drainage-Set, 2000 ml

Art. Nr. 50-7505, 50-7505/4 | Bei Ableitung durch Schwerkraft




Hinweis: Die jeweils relevanten Bereiche des Produktes sind farblich hervorgehoben.
Bitte zusätzlich die detaillierte Gebrauchsanweisung sowie die darin enthaltenen Warnhinweise beachten.

- 1 |** Material aus dem Verbandmaterial-Set auf dem blauen Abdecktuch bereitlegen.

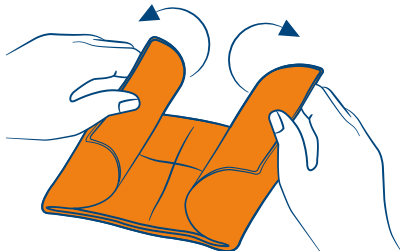


- 2 |** Handschuhe an der Öffnung anfassen und wie abgebildet anziehen.

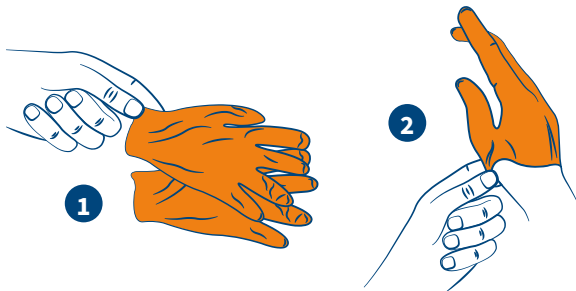

- 3 |** Silikonkappe bzw. Schutzkappe vorsichtig abziehen und entsorgen.




Lösen der drainova® Silikonkappe

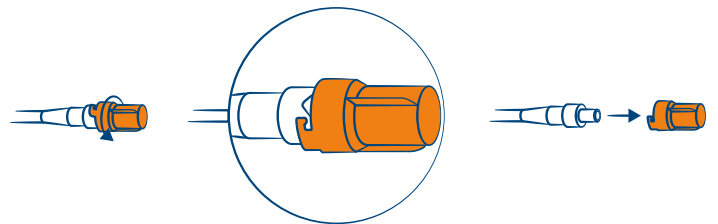


Lösen der PleurX™/drainova® Schutzkappe

- 4 |** Sicherheitsventil in die Verpackung eines Alkoholtupfers stecken und reinigen (30 Sekunden Einwirkzeit).

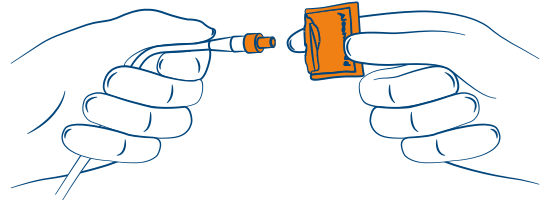

5 | Quetschklemme am Anschlusschlauch schließen.

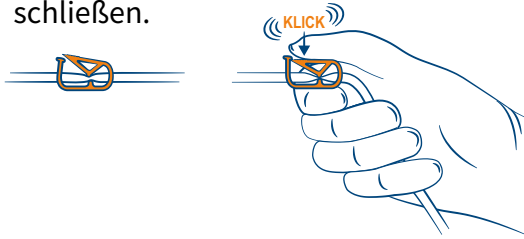


6 | Schutzhülle am Einführstift abziehen, ggfs. unter leichter Drehbewegung.




7 | Einführstift in das Sicherheitsventil schieben. Das Einrasten ist hör- und spürbar.



8 | Das Reservoir stets unterhalb der Katheter-Austrittsstelle halten.

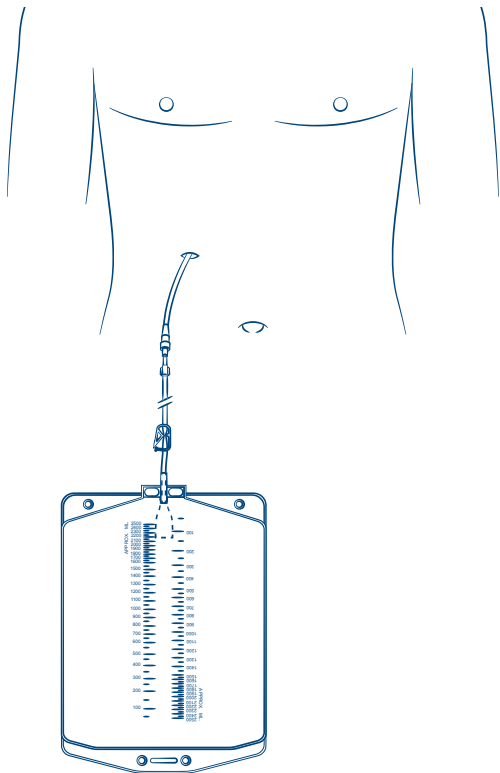

9 | Quetschklemme öffnen. Die Drainage beginnt.

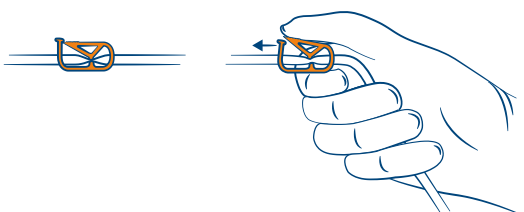


10 | Nach erfolgter Drainage Quetschklemme am Anschlusschlauch schließen.




11 | Sicherheitsventil und Anschlusschlauch trennen.



12 | Sicherheitsventil in die Verpackung eines Alkoholtupfers stecken und reinigen (30 Sekunden Einwirkzeit).

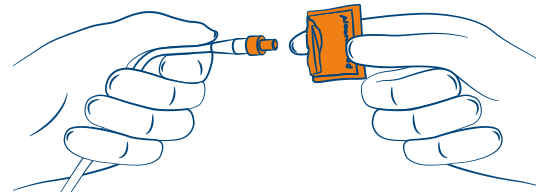

13 | Anbringen einer neuen Silikonkappe oder der Schutzkappe.

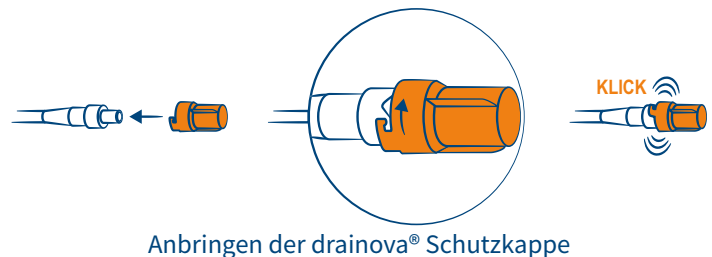

Code mit dem Smartphone scannen und Schulungsvideo ansehen.






Drainage-Anleitung | PleurX™ Drainage-Set

Art. Nr. 50-7500B, 50-7500B/4, 50-7510, 50-7510/4 | Bei Ableitung durch Vakuum




Hinweis: Die jeweils relevanten Bereiche des Produktes sind farblich hervorgehoben. Bitte zusätzlich die detaillierte Gebrauchsanweisung sowie die darin enthaltenen Warnhinweise beachten.


- 1 |** Das Paket mit dem Verbandsmaterial öffnen und auf dem sterilen blauen Tuch bereitlegen. Innenseite des Tuchs nicht berühren.

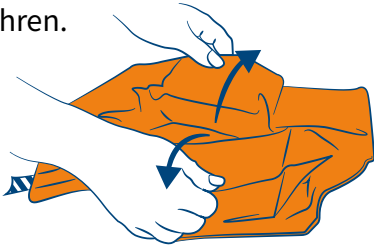

- 2 |** Die Handschuhe an der gefalteten Manschette wie gezeigt aufnehmen.

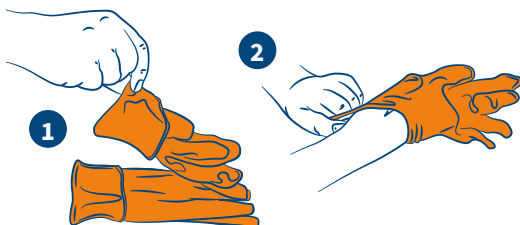


- 3 |** Rad an der Rollklemme in Richtung Flasche drehen, um die Klemme vollständig zu schließen.

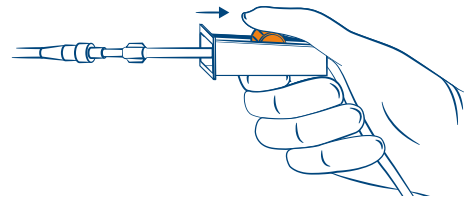


- 4 |** Die Abdeckung von der Zugangsspitze entfernen, die Zugangsspitze wieder auf die sterile blaue Verpackungsfolie legen.



- 5 |** Die Schutzkappe des Katheterventils durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und leichtes Ziehen entfernen.

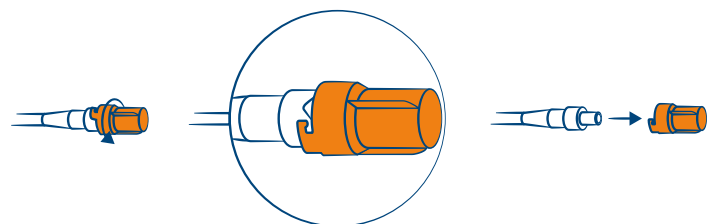


- 6 |** Den Bereich um die Ventilöffnung mit einem Alkoholtupfer reinigen.

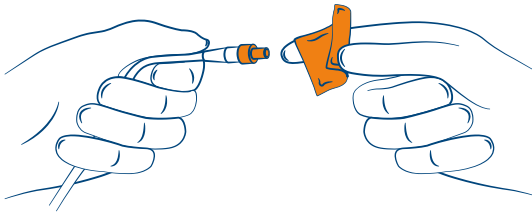


- 7 |** Die Zugangsspitze fest in das Katheterventil einführen. Die Zugangsspitze rastet hörbar und fühlbar ein.




- 8 |** Zum Entfernen der Sicherheitskappe den oberen Teil des Flansches fassen und nach außen ziehen.

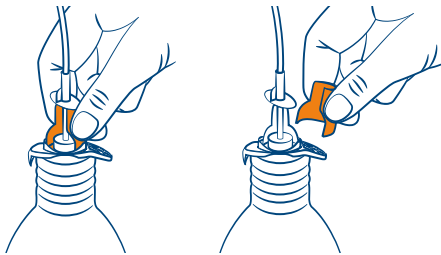


- 9 |** Den weißen Einfühdorn vorsichtig nach unten drücken, um das Foliensiegel zu durchstechen.

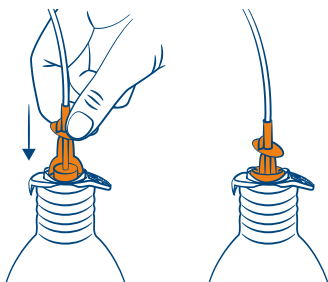

- 10 |** Das Rad der Rollklemme von der Vakuumflasche wegdrehen, um mit der Drainage zu beginnen. Der Flüssigkeitsstrom kann durch teilweises Schließen der Rollklemme verlangsamt werden.

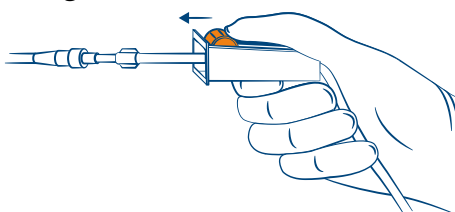


- 11 |** Wenn keine Flüssigkeit mehr fließt oder die Flasche gefüllt ist, die Rollklemme vollständig schließen.

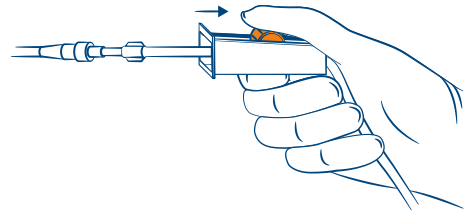


- 12 |** Die Zugangsspitze mit einer festen, gleichmäßigen Bewegung aus dem Ventil ziehen.



- 13 |** Das Katheterventil mit einem neuen Alkoholtupfer reinigen.

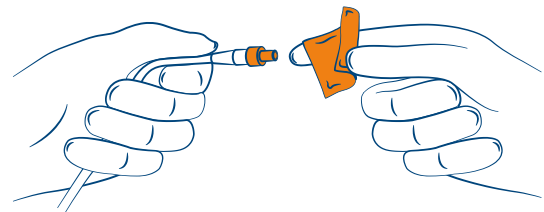

- 14 |** Die neue Schutzkappe auf das Katheterventil setzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis sie hörbar einrastet.

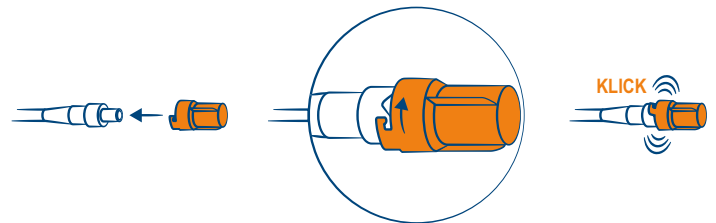

Code mit dem Smartphone scannen und Schulungsvideo ansehen.






Drainage-Anleitung | Verband anbringen

Art. Nr. 8020, 50-7290




Hinweis: Die jeweils relevanten Bereiche des Produktes sind farblich hervorgehoben.
Bitte zusätzlich die detaillierte Gebrauchsanweisung sowie die darin enthaltenen Warnhinweise beachten.

- 1 | Den Bereich um die Katheter-Austrittsstelle mit einem alkoholhaltigen Hautdesinfektionsspray reinigen. Wenn die Wunde verheilt ist und die Fäden gezogen sind, darf hierzu ein Alkoholtupfer verwendet werden. Sobald die Haut um den Katheter trocken ist, kann der neue Verband angebracht werden.

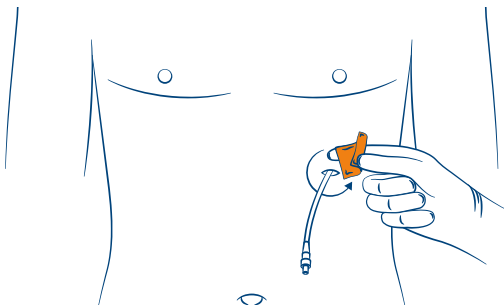


Beispiel: Desinfektion im Pleura-Bereich

- 2 | Die Schaumstoff-Schlitzkomresse mit dem Schlitz nach oben um den Katheter herum legen.

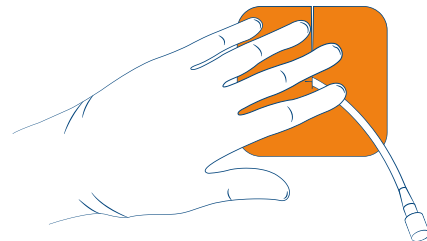


- 3 | Den Katheter aufrollen und auf die Schaumstoff-Schlitzkomresse legen.

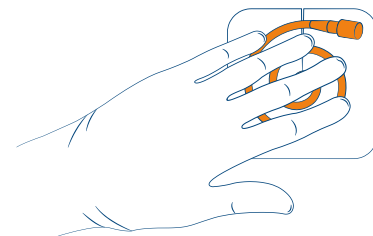




- 4 | Den Katheter mit den Mullkompressen abdecken.

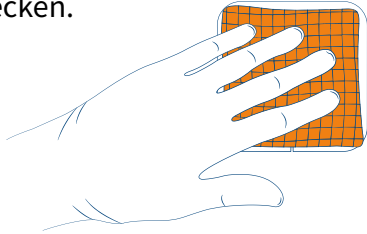


- 5 | Beide Handschuhe ausziehen.


- 6 | Die bedruckte Schutzfolie vom Folienverband abziehen.

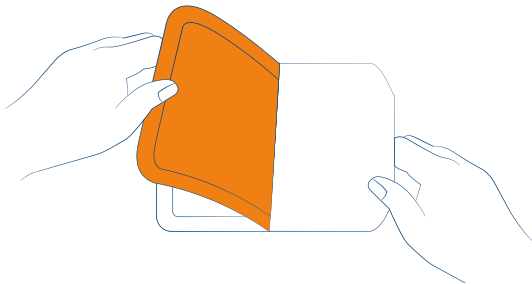

- 7 | Den selbstklebenden Folienverband über den Mullkompressen zentrieren und ihn auf der umliegenden Haut anlegen.

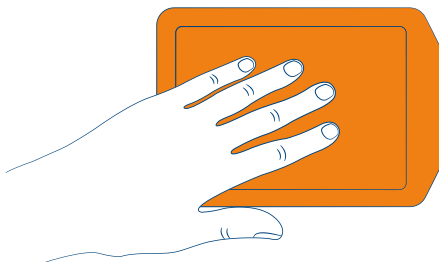

- 8 | Das Mittelteil der unbedruckten Schutzfolie vom Folienverband ablösen.

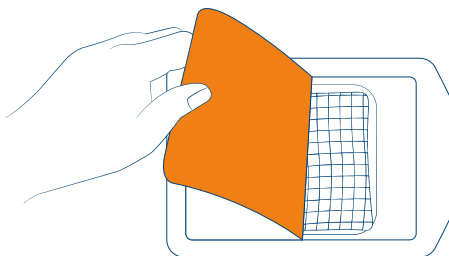

- 9 | Den Rahmen der unbedruckten Schutzfolie vorsichtig vom Folienverband entfernen und den gesamten selbstklebenden Folienverband von der Mitte zu den Rändern glattstreichen.

Hinweis: Das gebrauchte Verbandmaterial gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen.





Drainage-Aufzeichnungen

Datum	Volumen (ml)	Notizen





Datum	Volumen (ml)	Notizen

ewimed

EW_B0208DE_R005_2020-07



Germany | ewimed GmbH | Dorfstraße 24 | 72379 Hechingen-Boll | Tel.: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com | www.ewimed.com