

Informationen für Patienten

mit implantiertem Katheter zur
Drainage von Pleuraerguss und Aszites

ewimed





Wissenswertes

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,


aufgrund ständig nachlaufender Ergüsse haben sich Ihre behandelnden Ärzte dazu entschlossen, Ihnen die Implantation eines dauerhaft liegenden Katheters zu empfehlen.

Das Plus an Lebensqualität


Nach der Implantation und der anschließenden Überwachungszeit ermöglicht Ihnen dieser Katheter, wieder nach Hause entlassen zu werden. Sie müssen nun nicht mehr aufgrund des nachlaufenden Ergusses und den damit verbundenen Beschwerden die Klinik aufsuchen, um punktiert zu werden. Sie selbst, Ihre Angehörigen oder Pflegedienste können die Drainage nach einer Schulung selbst durchführen.

Der Katheter ist ein dünner, weicher Silikonschlauch, der unter der Haut liegt, an der Hautaustrittsstelle einwächst und nicht gewechselt werden muss. Am sichtbaren Ende befindet sich ein Sicherheitsventil mit einer Schutzkappe. In unbenutztem Zustand ist dieses Ventil geschlossen.

Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die getrennte Verwendung der Bezeichnungen für männlich, weiblich und divers (m/w/d) weitgehend verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

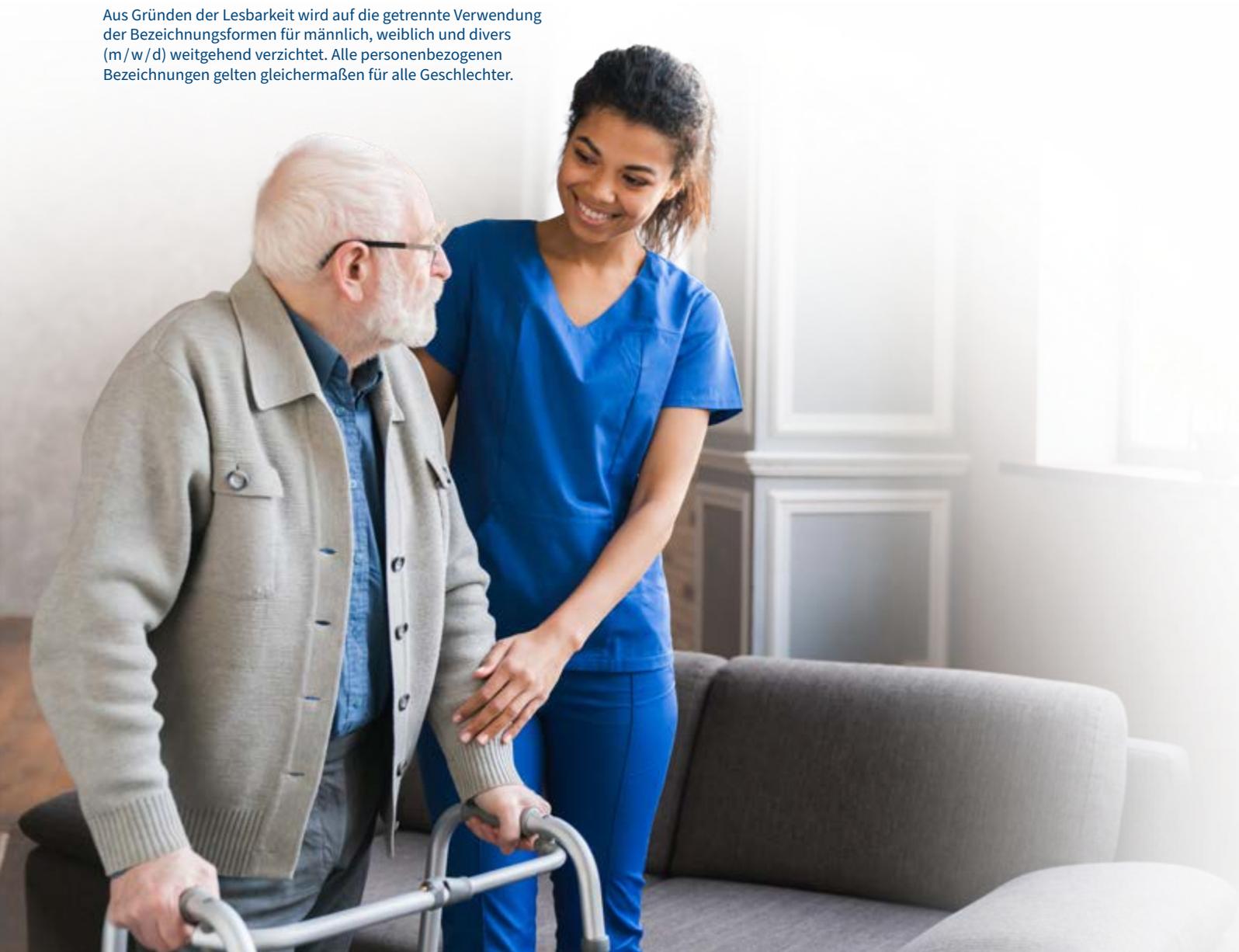


Der Katheter wird am Körper mit einem Verband fixiert und lässt sich unauffällig unter der Kleidung tragen.

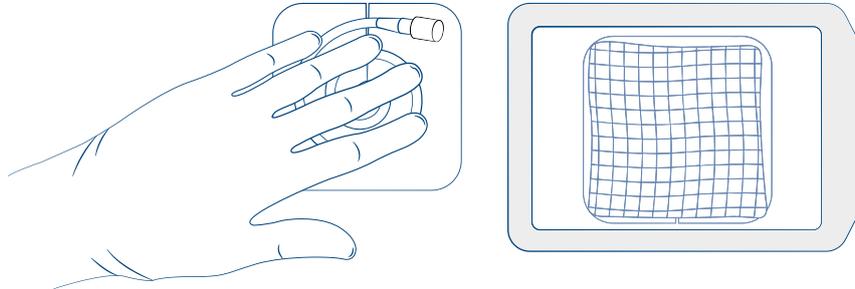


Sie profitieren somit von maximaler Bewegungsfreiheit, da ein Drainage-System nur zur Kurzzeitdrainage angeschlossen werden muss.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- + Selbstständige, schnelle und sichere Drainage zu Hause möglich
- + Keine weiteren Krankenhausaufenthalte zum Ablassen des Ergusses
- + Keine wiederholten, schmerzhaften Punktionen
- + Einfache und intuitive Handhabung
- + Einmaliger, minimalinvasiver Eingriff zur Implantation des Katheters
- + Höchste Sicherheitsstandards durch Schlüssel-Schloss-Prinzip des Katheters mit Reservoir
- + Erhöhte Mobilität und Selbstständigkeit für Sie als Patient
- + Verringerung der Infektionsgefahr
- + Hohe Rate an spontanen Pleurodesen bei Pleuraergüssen ohne separaten Eingriff
- + **Sie als Patient stehen bei uns im Mittelpunkt**

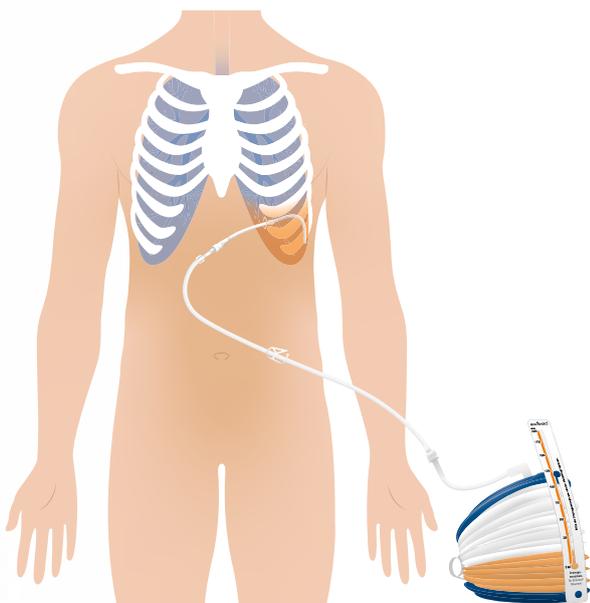

Anwendung eines drainova® Reservoirs am Beispiel einer Pleuraerguss-Drainage

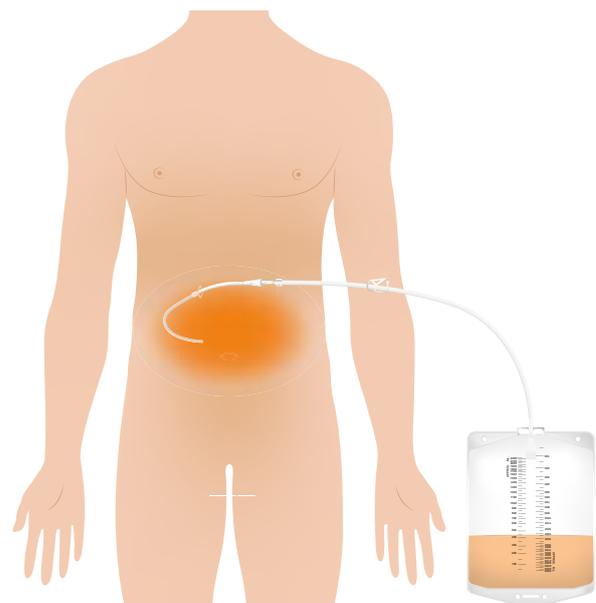

Anwendung eines ewimed Schwerkraftreservoirs am Beispiel einer Aszites-Drainage



Das ewimed Versorgungskonzept

Unser Versorgungskonzept bietet Patienten, Angehörigen und Ärzten eine klare Struktur und maximale Sicherheit: von der Implantation über die Schulung bis zur häuslichen Anwendung. So stellen wir sicher, dass die Nachversorgung reibungslos funktioniert – einfach, sicher und gut organisiert.





Entlassung aus dem Krankenhaus

Nach erfolgreicher Implantation des Katheters und noch während Ihres Klinikaufenthaltes übermittelt das Krankenhaus die für die Schulung relevanten Daten an uns, sodass wir Sie und ggfs. Ihre Familie oder Ihren Pflegedienst kontaktieren können.



Terminvereinbarung mit einem unserer Schulungsmitarbeiter

Ein Schulungsmitarbeiter aus Ihrer Nähe meldet sich zeitnah telefonisch bei Ihnen, Ihren pflegenden Angehörigen oder dem beauftragten Pflegedienst. Damit ist sichergestellt, dass die Versorgung nahtlos weiterläuft und keine Versorgungslücke für Sie entsteht. Alle benötigten Materialien und Unterlagen bringt unser Schulungsmitarbeiter zum Termin mit – Sie müssen keinerlei Vorbereitungen hierfür treffen.



Schulung

Unser Schulungsmitarbeiter kommt mit dem Erstversorgungsmaterial zu Ihnen nach Hause. Er zeigt Ihnen oder Ihren Pflegenden – Schritt für Schritt und in aller Ruhe – wie die Drainage und der Verbandwechsel sicher durchgeführt werden. Dabei geht er auf all Ihre Fragen ein und nimmt sich die nötige Zeit, bis Sie sich im Umgang mit dem System sicher fühlen.

Zum Abschluss erhalten Sie eine Mappe mit allen Schulungsinhalten zum Nachlesen. Zusätzlich finden Sie auf unserer Website anschauliche Videos zu jedem Drainage-Set – ideal, um das Gelernte jederzeit aufzufrischen. Den QR-Code zum passenden Video finden Sie auf der nächsten Seite.



Nachbestellung der Materialien

Zur Nachversorgung von Drainage-Material müssen Sie ein Folgerezept bei Ihrem Hausarzt anfordern. Da das Drainage-Material nicht in Apotheken oder Sanitätshäusern erhältlich ist, schicken Sie Ihr Original-Rezept bitte an uns. Hierzu finden Sie zwei Freiumschläge in Ihrer Patientenmappe oder online in unseren Download-Bereich der Website (ewimed.de/downloads-patient).

Behalten Sie Ihren Materialbestand im Auge, da Sie beachten müssen, dass zwischen Briefeinwurf und unserer Materiallieferung ca. fünf Werktage vergehen. Das Material wird vom Paketdienst direkt zu Ihnen nach Hause geliefert. Privatversicherte können Drainage-Material direkt und bequem über unserem Online-Shop bestellen: ewimed.de/shop



Retouren und Rücksendungen

Wenn Sie das Material nicht mehr benötigen, kontaktieren Sie gerne das ewimed-Team telefonisch, über das Kontaktformular auf der Website oder per E-Mail. Die Kontaktdaten hierzu finden Sie auf Seite 7.



Produkte zur Heimdrainage

Alle unsere Heimdrainage-Sets ermöglichen es Ihnen, bei wiederkehrenden Pleuraergüssen oder Aszites, eine Drainage zu Hause durchzuführen – sicher und komfortabel, ohne Klinikaufenthalt.

Das Drainage-System wird nur vorübergehend an den implantierten Katheter angeschlossen und anschließend wieder entfernt. Sie profitieren somit von maximaler Bewegungsfreiheit und erhalten Lebensqualität zurück.

Je nach Ergussart und Ergussmenge wird der behandelnde Arzt das geeignete Reservoir empfohlen.

Eine gute Ablesbarkeit der Drainagemenge ist bei allen Produkten gegeben.

Folgende Produkte stehen zur Auswahl:



drainova® Reservoir, Drainage Set
Ableitung durch Soft-Vakuum



ewimed.de/drainova/



ewimed Drainage-Set, 2000 ml
Ableitung durch Schwerkraft



ewimed.de/ewimed-set/



PleurX™ Drainage-Set
Ableitung durch Vakuum



ewimed.de/pleurx/

QR-Codes mit dem Smartphone scannen und Schulungsvideo ansehen.

Online Shop

In unserem Onlineshop bieten wir **ergänzendes, praktisches Zubehör zu Ihren Drainageprodukten** wie Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, Folienverbände, Hautschutzprodukte und Pflasterentferner, die den Umgang mit der Drainage erleichtern und Ihren Alltag angenehmer gestalten. Darüber hinaus finden Sie **Nahrungsergänzungsmittel**, die Ihr Immunsystem **unterstützen und zu Ihrem Wohlbefinden beitragen**.



QR-Code scannen und losshoppen!
ewimed.de/shop/



Kontakt

Sie haben Fragen?

Dann melden Sie sich bei uns, wir sind gerne für Sie da!

Für alle Fragen steht Ihnen Ihr behandelnder Arzt stets zur Seite. Sollte Ihr Arzt unsere Drainage-Systeme jedoch noch nicht kennen oder sollten Sie auf der Suche nach der richtigen Klinik sein, beraten wir Sie gerne persönlich.

ewimed GmbH

Dorfstrasse 24
72379 Hechingen
Tel.: +49 7471 73972-0
info@ewimed.com
www.ewimed.de



Für Rückfragen stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag (08:00 – 17:00 Uhr) gerne zur Verfügung.

PleurX™/PeritX™ is a trademark and/or registered trademark of Becton Dickinson and Company, or one of its subsidiaries. drainova® is a trademark and/or registered trademark of ewimed.



Die ewiApp ist Ihr digitaler Drainagebegleiter.

Behalten Sie den Überblick über Ihre Drainagen! Mit der ewiApp können Sie nicht nur bequem Ihre Drainagen dokumentieren, sondern auch viele Informationen rund um Ihre Versorgung durch ewimed entdecken.

Weitere Informationen zur ewiApp finden Sie unter www.ewimed.de/app
Ihre Lebensqualität steht für uns an erster Stelle!



QR-Code scannen und schon kann's losgehen!
oder online unter app.ewimed.com

ewimed

EW_B0011DE_V4_2025-05

