

# Gebrauchsanweisung und Produktinformation

## Sicherheitsklemme für PleurX<sup>®</sup>

### Technische Daten

**P1100**      **Sicherheitsklemme für PleurX<sup>®</sup>**

Mehrfach verwendbar (KEIN Einmalartikel).

Mindestabnahme 1 VE = 10 Stück, unsteril.

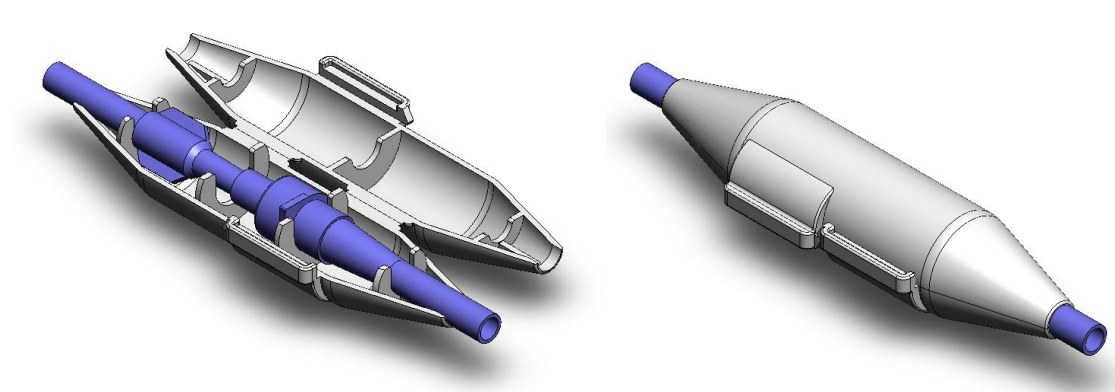


Abbildung 1: Sicherheitsklemme für PleurX<sup>®</sup>

### Beschreibung Sicherheitsklemme:

Verhindert das versehentliche Dekonnektieren von PleurX<sup>®</sup> Katheter-Ventil und den PleurX<sup>®</sup> Drainage-Sets

### Haupteinsatzgebiete:

- Sichern der Verbindung zwischen einem PleurX<sup>®</sup> Katheter-Ventil und den PleurX<sup>®</sup> Drainage-Sets.

### Vorteil:

- Unbeabsichtigtes Dekonnektieren der Verbindung von PleurX<sup>®</sup> Katheter-Ventil und PleurX<sup>®</sup> Drainage-Sets wird vermieden.
- Schutz vor Verschmutzung der Verbindung.
- Kein zusätzliches Sichern z.B. durch Klebestreifen nötig.

### Vorsichtshinweise / Gebrauchsanweisung:

- Grundsätzlich ist die Verbindung des Ventils mit dem Einführstift durch eine Raste (Klick) bereits gesichert.

Einige Kunden wollen jedoch eine weitere mechanische Halterung, um ein versehentliches Dekonnektieren zu verhindern.

Bisher wird dies in der Regel vom Pflegepersonal durch Anbringen eines Klebestreifens um das Ventil bewerkstelligt.

Auf diese zusätzliche Sicherung mit Klebestreifen kann mit der Sicherheitsklemme verzichtet werden.

- Bedienung:
  - 1) Legen Sie den Katheter mit angeschlossenem PleurX<sup>®</sup> Drainage-Sets so in die Sicherheitsklemme ein, dass die Verbindung auf der Seite mit den vier Rippen anliegt (siehe Abb.1).  
Die Einlegerichtung spielt hierbei keine Rolle.
  - 2) Schließen Sie die Klemme durch einfaches Zusammendrücken der Hälften.
  - 3) Nach Gebrauch öffnen Sie die Rasten des Verschlusses und ziehen sie die Hälften auseinander.
  
- Bitte achten Sie darauf, die Schlauchverbindung korrekt in die Klemme einzulegen, um ein Einquetschen des Schlauches zu vermeiden.  
Sollten Sie die Schlauchverbindung abquetschen und somit ggf. den Katheter beschädigen, nutzen Sie die blaue Notfall-Schiebeklemme aus dem Verbandmaterialset in dem PleurX<sup>®</sup> Drainage-Set, um den Katheter zu verschließen (siehe hierzu auch Gebrauchsanweisung PleurX<sup>®</sup> Drainage-Set).
  
- Die Klemme wird unsteril geliefert und angewendet, da sie keinerlei Kontakt mit flüssigkeitsführenden Oberflächen hat. Falls gewünscht, kann die Klemme aufbereitet werden. Thermisch fest ist sie allerdings nur bedingt.  
Bitte befolgen Sie hierzu die Aufbereitungsrichtlinie, die Sie über ewimed erhalten bzw. im Internet unter [www.ewimed.com](http://www.ewimed.com) downloaden können.
  
- Bitte beachten Sie zusätzlich die Hygienevorschriften Ihrer Einrichtung.
  
- Bei Nutzung der Sicherheitsklemme zum Ablassen von Pleura- oder Aszitesflüssigkeit über ein PleurX<sup>®</sup> Drainage-Set beachten Sie bitte zusätzlich die zugehörige Drainageanleitung.
  
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sichtbare Schäden vorliegen (z.B. defekter Klickverschluß / Klemme schließt nicht mehr, herausgebrochene Materialteile, Oberflächenkorrosion oder „unschöne“ Optik wegen Alterungszustand).



Dieses Produkt ist latexfrei



Lotnummer / Chargenbezeichnung



Bei beschädigter Verpackung nicht benutzen



Beachten Sie die Gebrauchsanweisung



Haltbarkeitsdatum



Bestellnummer



Herstelldatum des Produkts



Hersteller des Produkts

PleurX<sup>®</sup> is a trademark and/or registered trademark of CareFusion Corporation, or one of its subsidiaries.



**ewimed**  
Josef-Baur-Straße 1  
72379 Hechingen



**ewimed**  
Josef-Baur-Straße 1  
D - 72379 Hechingen  
Tel.: 07471-73972-0  
Fax: 07471-73972-13  
info@ewimed.com  
www.ewimed.com