


Gebrauchsanweisung drainova Adapter 3/8" auf LL

P8448 drainova Adapter 3/8" auf LLW

P8500 drainova Adapter 3/8" auf LLM

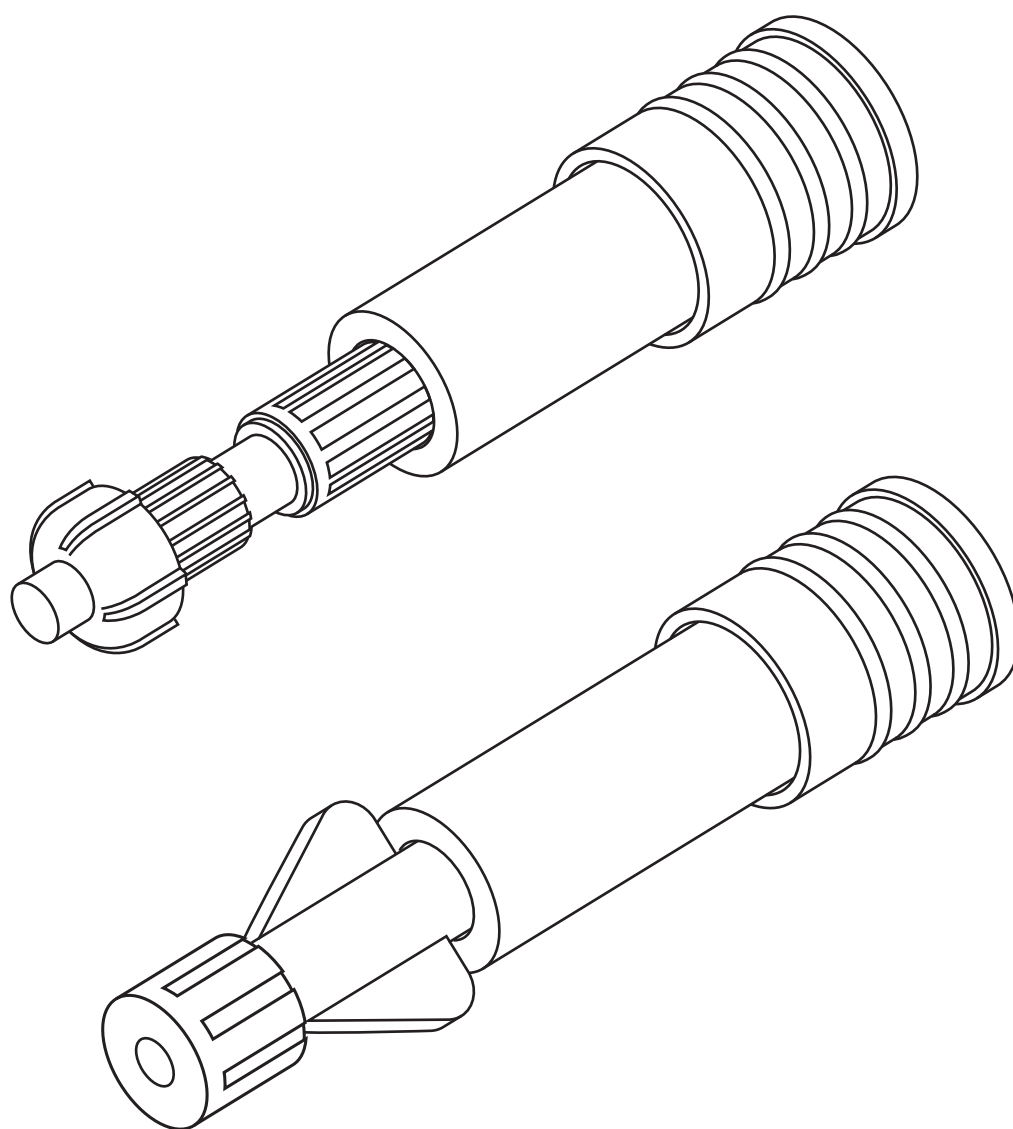

Technische Daten

REF P8448 drainova Adapter 3/8" auf LLW

REF P8500 drainova Adapter 3/8" auf LLM

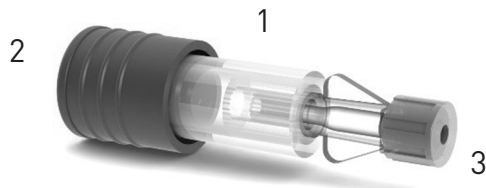


Abbildung 1: drainova Adapter 3/8" auf LLW

- 1 Anschlusschlauch 5 cm / 3/8"
- 2 Schutzkappe
- 3 Luer-Lock weiblich (LLW)
- 4 Luer-Lock männlich (LLM)

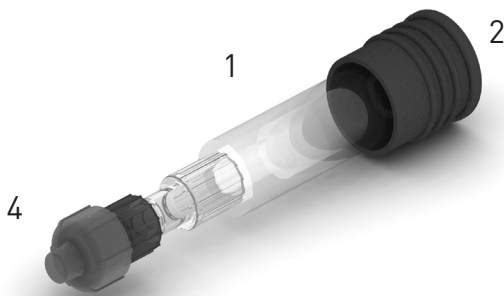


Abbildung 2: drainova Adapter 3/8" auf LLM

Material: PVC
Mindestabnahme: 1 VE = 10 Stück, steril

Anwendungsgebiete

P8448 drainova Adapter 3/8" auf LLW

Zur Konnektierung eines männlichen Luer-Lock-Anschlusses mit einem Stufenkonnektor, z.B. PleurX® Spülschlauch (50-7245).

P8500 drainova Adapter 3/8" auf LLM

Zur Konnektierung eines weiblichen Luer-Lock-Anschlusses mit einem Stufenkonnektor.

Beschreibung

Die drainova Adapter P8448 und P8500 dienen als Übergangsstück zwischen einem Stufenkonnektor und einem männlichen oder weiblichen Luer-Lock-Anschluss. Die Adapter werden auf der Luer-Lock-Seite mit dem passenden Gegenstück und auf der Schlauchseite mit dem Stufenkonnektor eines anderen Systems verbunden.

Achtung


- Beim Verbinden mit anderen Systemen muss der Adapter fest auf den Stufenkonnektor aufgedrückt werden, um eine versehentliche Dekonnektierung (Trennung) zu verhindern.
- Durch nicht korrektes Anschließen des Adapters kann es zu Leckagen und Verunreinigungen kommen. In solchen Fällen sollten die Anschlussstücke gereinigt werden oder ggf. ein neuer Adapter verwendet werden.
- Es ist darauf zu achten, dass der Adapter sauber gehalten wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn:
 - die sterile Verpackung beschädigt ist,
 - das Produkt beschädigt ist,
 - das Verfallsdatum überschritten ist.

Hinweise

- Bitte beachten Sie die Hygienevorschriften Ihrer Einrichtung.
- Bei Nutzung des Adapters über einen PleurX® Spülschlauch (50-7245) beachten Sie bitte zusätzlich die zugehörige Drainageanleitung.
- Das Produkt ist frei von DEHP.



Lotnummer / Chargenbezeichnung

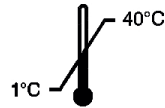

Temperaturbegrenzung beachten



Gebrauchsanweisung beachten



Pyrogenfrei



Sterilisiert mit Ethylenoxid



Bei beschädigter Verpackung
nicht verwenden



Dieses Produkt ist latexfrei



nicht resterilisieren



Nur zum einmaligen Gebrauch



Verwendbar bis ...



Herstellungsdatum des Produkts



Bestellnummer



Hersteller des Produkts



HMT Medizintechnik GmbH
Frauenstraße 30
82216 Maisach



0481

PleurX® is a trademark and/or registered trademark
of CareFusion Corporation, or one of its subsidiaries.

ewimed
Dorfstraße 24
D - 72379 Hechingen
t 07471-739 72-0
f 07471-739 72-13
info@ewimed.com
www.ewimed.com

ewimed