

Informationen für Hausärzte

ewimed

Zur Abgabe bei Ihrem Hausarzt





Diesen Flyer erhalten Sie, da einer Ihrer Patienten oder Patientinnen an einem wiederkehrenden Pleuraerguss oder Aszites leidet und einen Katheter von der Firma ewimed GmbH implantiert bekommen hat. So kann er oder sie den Erguss komfortabel zu Hause ablassen und muss nicht wiederholt für eine Punktion in die Klinik.

Wir sind ewimed!

ewimed ist ein Medizintechnikhersteller aus dem Medical Valley Hechingen und Spezialist im Thema Drainage von Pleuraerguss und Aszites. Wir bieten ein Therapiekonzept an, in dem durch einen minimalinvasiven Eingriff ein subkutan getunnelter Katheter in der Klinik implantiert wird. Dies ermöglicht dem Patienten eine selbstständige Drainage des Ergusses zu Hause.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Lotta und Egon Wiest, Geschäftsführer & Gründer der Firma ewimed GmbH.



Therapieform, Katheter & Implantation

Krankheitsbild

Bei Patienten mit malignen Tumoren, Patienten mit Leberzirrhose oder Herzinsuffizienz können sich als Begleitsymptome rezidivierende Pleuraergüsse und Aszites bilden. Symptome wie Atemnot, Schmerzen und Erschöpfung schränken Ihre Patienten im Alltag stark ein.

Therapieform

Die Implantation eines drainova® oder PleurX™/PeritX™ Katheter schafft hier Abhilfe. Es handelt sich um einen risikoarmen, minimalinvasiven Eingriff, der bereits seit vielen Jahren in Kliniken durchgeführt wird. Je nach Krankheitsbild, Zustand des Patienten und ärztlicher Therapie der Grunderkrankung, kann die Mobilität des Patienten durch Symptomlinderung deutlich verbessert und die Lebensqualität gesteigert werden. Nach der Entlassung aus der Klinik kann der Patient selbst, seine Angehörigen oder ein Pflegedienst die Drainage der Ergüsse zu Hause selbstständig durchführen. Dadurch werden wiederholte Punktionen in der Klinik, welche für Patienten erhöhte Anstrengung und Schmerzen bedeuten, vermieden. So kann er mehr Zeit mit seiner Familie und Freunden verbringen.



Die Implantation des Katheters erfolgt in der Klinik.

drainova® ArgentiC Katheter

ewimed






ewimed Versorgungskonzept

Kurze Zeit nach erfolgreicher Implantation des Katheters und der Krankenhausentlassung besucht einer unserer deutschlandweit vertretenen Schulungsmitarbeiter jeden neuen Patienten zu Hause und gibt ihm selbst, seinen Angehörigen oder den Pflegenden eine Einweisung in die korrekte Handhabung unserer Drainage-Systeme. Dies entlastet den Patienten, die Ressourcen der Klinik und auch Ihrer Praxis.

Ablauf des ewimed Versorgungskonzeptes

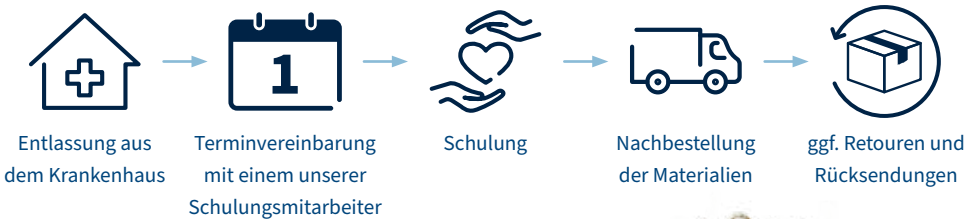



Aufgaben Hausarzt

Rezeptausstellung
Entfernung Hautnaht
Vorgehen bei verstopfem Katheter



✓ Rezeptausstellung

Abhängig vom Drainageintervall (ärztliche Vorgabe aus der Klinik) benötigt Ihr Patient Erst- und Folgerezepte für die Drainage-Systeme, mit denen er die Drainage zu Hause durchführen kann. Diese werden von Ihnen als Hausarzt ausgestellt.

Bei den Drainage-Systemen handelt es sich um verschreibungspflichtige Hilfsmittel. Deshalb richtet sich die Verordnung der Drainage-Sets nach der Hilfsmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses.



Die Verordnung der Drainage-Sets ist für Sie dadurch **nicht budgetrelevant**.

Eine Hilfestellung für die Ausstellung der Folgerezepte finden sie auf unserer Website bei unseren Musterrezepten.

Ihr Patient erhält das Drainage-Material nicht in Apotheken oder Sanitätshäusern, sondern ausschließlich über die Firma ewimed. Dazu schickt Ihr Patient das von Ihnen ausgefüllte Rezept an uns. Ein Freiumschlag zum Postversand liegt hierfür in seiner Patientenmappe oder kann bei uns angefordert werden.

Sobald das Rezept im Original bei uns eingeht, senden wir die Ware direkt zu den Patienten nach Hause und holen umgehend die Bestätigung zur Kostenübernahme bei der jeweiligen Krankenkasse ein.



Krankenkasse bzw. Kostenträger
Krankenkasse, bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten
Angaben zum Versicherten geb. am

Kostenträgerkennung Versicherten-Nr. Status

Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Dittlen

Rp. (Bitte Leerräume durchabzeichen)

Genauere Artikel-Bezeichnung und Art. Nr. eintragen

Wichtig: genaue Diagnose, z.B. Pleuraerguss/Aszites *Stempel & Unterschrift*

Bei Arbeitsunfall auszufüllen

Untfalltag Untfallbetrieb oder Arbeitsgebernummer

Abgabedatum in der Apotheke

Unterschrift des Arztes
 Muster 16 (10.2014)



Hier finden Sie weitere Musterrezepte & Vorlagen, oder unter folgendem Link:
ewimed.com/medizinisches-fachpersonal/niedergelassene-aerzte/downloads-mediathek-nl-a/

Folgende Artikel können für die Heimversorgung verordnet werden:



Soft-Vakuum
 drainova® Reservoir Drainage-Set 2000 ml (Art. Nr. 2010), 2VE à 10 Stück



Schwerkraft
 ewimed Drainage-Set 2000 ml (Art. Nr. , 50-7505), 2VE à 10 Stück



Vakuum
 PleurX™ Drainage-Set 1000 ml oder 500 ml (Art. Nr. 50-7510, 50-7500B), 2VE à 10 Stück

Jedem Drainage-Set liegt ein drainova® Verbandmaterial-Set bei. Dieses enthält alle notwendigen Materialien, um die Drainage mit einem unserer Katheter durchzuführen.



Entfernung Haltenaht

Der Katheter wird mittels 2 kleinen Inzisionen implantiert. Der Hautfaden kann nach 7–10 Tagen und der Haltefaden an der Katheter-Austrittsstelle nach ca. 30 Tagen entfernt werden.

Sehr oft werden die Fäden in der Klinik gezogen, welche die Implantation vorgenommen hat. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie als Hausarzt die Fäden nach der empfohlenen Verweildauer selbst entfernen.



Verstopfter Katheter

Anspülen oder Weiterleitung in die Klinik

Falls der Katheter kein Erguss mehr fördert, kann es sein, dass der Katheter verstopft ist. Unter Umständen kann ein Anspülen des Katheters erforderlich sein, um so eine reibungslose Drainage wieder zu gewährleisten.

Das Anspülen wird in den meisten Fällen vom Klinikarzt unter sterilen Bedingungen durchgeführt. Sollten Sie sich dazu entscheiden das Anspülen selbst zu übernehmen, kontaktieren Sie uns und wir stellen Ihnen gerne eine Handlungsempfehlung und die dafür benötigten Produkte zur Verfügung.

WICHTIG! Das Anspülen eines Katheters ist eine ärztliche Tätigkeit und kann an med. Fachpersonal delegiert werden.

WICHTIG! Weisen Sie Ihren Patienten darauf hin, zwei neue Drainage-Sets für das Anspülen des Katheters mitzubringen.

Katheterpass / Implantationsausweis

Ihr Patient hat bei seiner Entlassung zusammen mit dem Arztbrief vom Krankenhaus einen sogenannten Katheterpass/Implantationsausweis erhalten. Dieser dient der Patientensicherheit und enthält zur schnellen Orientierung alle wichtigen medizinisch relevanten Informationen zum Patienten, zum implantierten Katheter und der behandelnden Klinik. Sollten Komplikationen oder Notfälle auftreten finden Sie hier außerdem die richtigen Ansprechpartner.





Häufig gestellte Fragen

Sollten Sie weitere Fragen haben, finden Sie einige häufig gestellten Fragen auf unserer Website:

[www.ewimed.com/medizinisches-fachpersonal/
niedergelassene-aerzte/faq/](http://www.ewimed.com/medizinisches-fachpersonal/niedergelassene-aerzte/faq/)



Dort finden Sie außerdem einen separaten Bereich mit speziellen Informationen für niedergelassene Ärzte:

[www.ewimed.com/medizinisches-fachpersonal/
niedergelassene-aerzte/](http://www.ewimed.com/medizinisches-fachpersonal/niedergelassene-aerzte/)



Kontakt

Während der Therapie stehen wir Ihnen und Ihren Patienten selbstverständlich bei allen Fragen zur Verfügung.



ewimed GmbH

Dorfstrasse 24

72379 Hechingen

Tel.: +49 7471 73972-0

Fax: +49 7471 73972-13

info@ewimed.com

Haben Sie ein Anliegen, das Sie vor Ort besprechen möchten, kommt auch gerne der zuständige Außendienstmitarbeiter zu Ihnen.



Kennen Sie weitere Patienten, welche aufgrund einer Vorerkrankung an einem Pleuraerguss oder Aszites leiden und für diese Art der Therapie in Frage kommen könnten? Dann kontaktieren Sie uns gerne und wir helfen Ihnen eine passende Klinik zu finden, welche diese Katheter bereits implantiert und Erfahrung damit hat.

ewimed

EW_B0025DE_R002_2023-10



Germany | ewimed GmbH | Dorfstrasse 24 | 72379 Hechingen | Tel.: +49 7471 73972-0
Austria | ewimed austria GmbH | Tullnerbachstrasse 92a | 3011 Neu-Purkersdorf | Tel.: +43 2231 22500
info@ewimed.com | www.ewimed.com